

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TAPABOCAS CONVENCIONAL

- Es un elemento de protección personal establecido.
- El uso de tapabocas se realizará por turno.
- Lávese las manos antes y después de manipular el tapabocas.
- Asegúrese de usar el lado correcto del tapabocas.
- Evite tocar la parte exterior del tapabocas ya que podría estar contaminada.



MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA N95




Es para uso exclusivo de personal de salud y aquellos(as) trabajadores(as) que realicen limpieza y desinfección de áreas donde se movilicen casos sospechosos o confirmados por el nuevo coronavirus (nCoV-2019) en todas las sedes



RECOMENDACIONES:

Recuerde lavar sus manos antes de utilizar sus elementos de protección

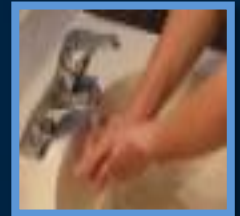

- Retire el tapabocas sin tocar la parte frontal y deséchelo en un contenedor de basura inmediatamente.
- Si está en un entorno médico, deposítelo en la caneca roja, si no; colóquelo en doble bolsa negra y deposítelo en la bolsa negra de residuos.
- Lave muy bien sus manos al finalizar este proceso. (Protocolo de lavado de manos)

